


TERMOCOAGULACIÓN

Pasos para limpieza de sonda y el equipo


PASO 1: DESINFECCIÓN *(DEJAR ENFRÍAR PRIMERO)*



Pasar un algodón con alcohol por todo el equipo.

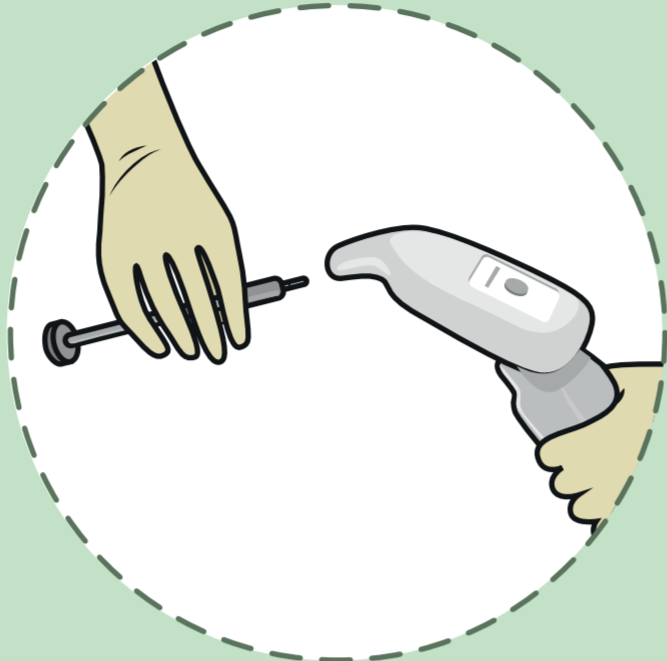

Retirar la sonda del equipo.

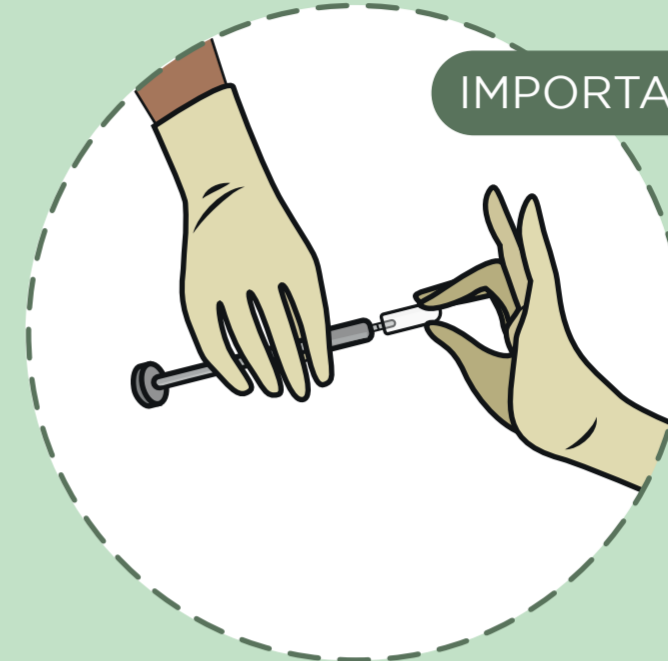


Colocar el jebe en la punta de la sonda.

PASO 2: LIMPIEZA



Lavar la sonda con jabón.

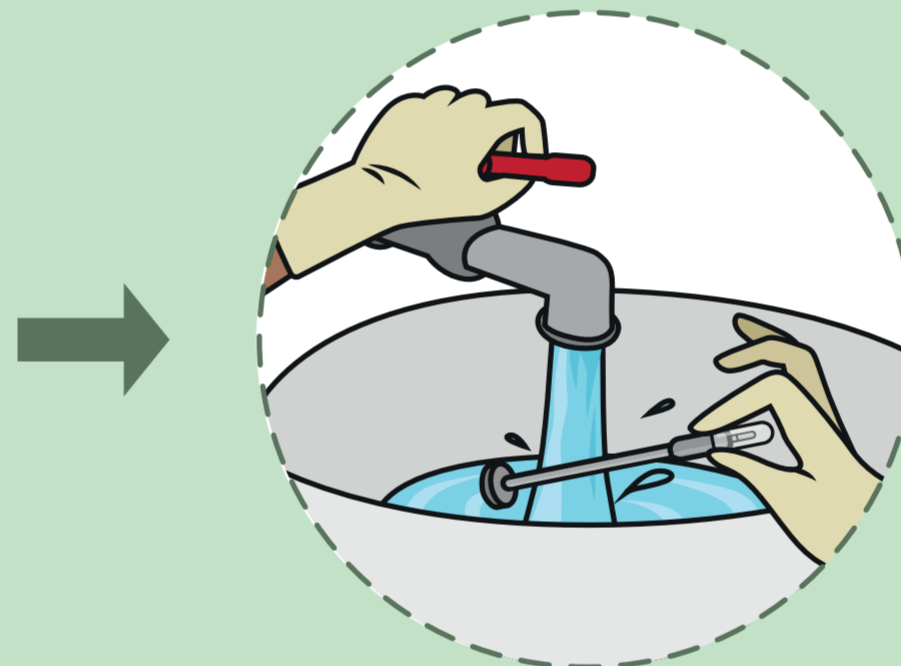

Enjuagar con agua y dejar secar.

PASO 3: DESINFECCIÓN DE ALTO NIVEL (DAN)



Poner la sonda en alcohol de >95 o en gluteraldehído.

(Enjuagarla con alcohol inmediatamente después de retirarla del gluteraldehído.)



Enjuagar la sonda con agua limpia.

